
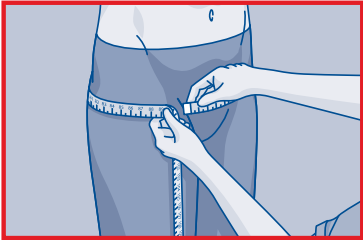



Attends® Pull-Ons

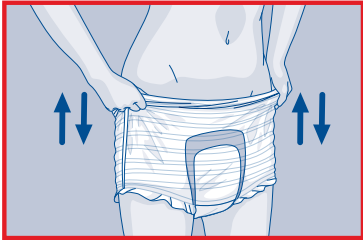


Protocoles d'utilisation

- 1 Préparation**


Mesurez le tour des hanches et la taille. Utilisez la plus grande de ces deux mesures pour vous assurer que vous sélectionnez le taille adéquate du produit.
- 2 Fixation**

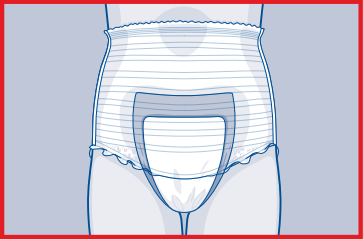
Le sous-vêtement jetable Attends Pull-Ons s'utilise comme une culotte normale: vous pouvez les mettre et retirer facilement, tant que vous voulez.
- 3 Ajustement**

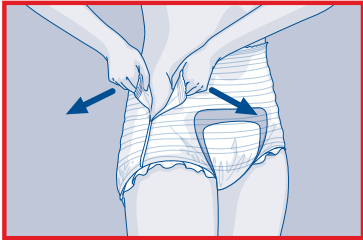
Grâce aux larges élastiques doux sur la ceinture, la culotte s'ajuste parfaitement au corps, quelle que soit sa taille et le matériel respirable contribue à garder une peau saine.
- 4 Enlèvement**


Les sous-vêtements jetables sont très faciles à enlever et à changer: soit vous descendez la culotte, soit vous la déchirez aux côtés.

Conseils pour une application correcte

Sélection

- Mesurez le tour des hanches et la taille. Utilisez la plus grande de ces deux mesures pour vous assurer que vous sélectionnez la taille adéquate du sous-vêtement jetable Pull-On.
- Choisissez l'absorption sur la base du volume des pertes d'urines. Essayez d'abord le niveau d'absorption plus faible avant de passer vers un produit plus absorbant: une couche plus mince relève le sentiment de dignité et de confort pour l'utilisateur.
- Les sous-vêtements jetables Pull-Ons peuvent offrir une solution pour des personnes qui enlèvent les couches anatomiques de leurs culottes de fixation.

Fixation

- Assurez-vous que le produit est fixé dans le bon sens.
- La bande colorée doit être placée à l'arrière (tailles S, M, L et XL)

Enlèvement

- Enroulez la protection usagée et jetez la dans la poubelle déchets.
- Ne pas jeter la protection dans les toilettes.



Attends Pull-Ons sont testés et approuvés par proDERM, l'Institut Germanique renommé de la Recherche dermatologique appliquée.

Pour plus d'informations visitez

www.attends.fr www.attends.be www.attends.ch